


NEODERM


ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΣΗΣ

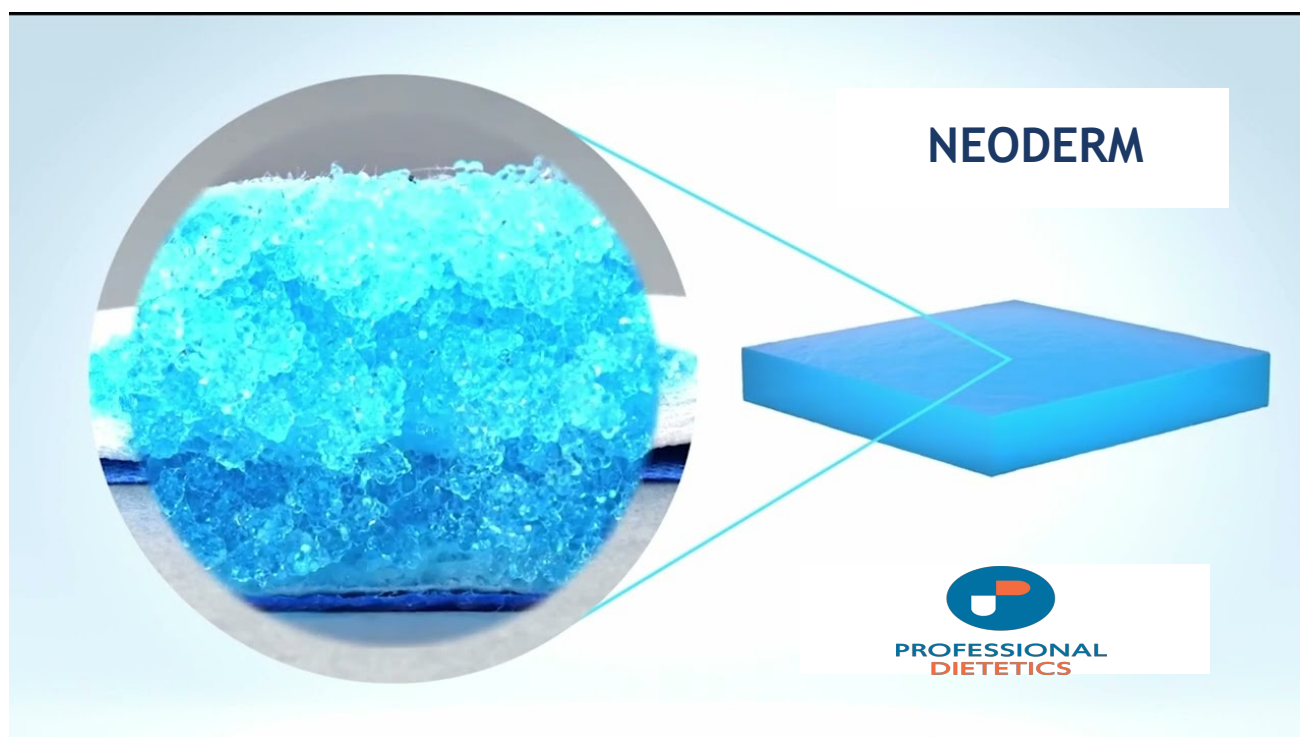


ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΣΗΣ
Οδηγίες Χρήσης :



1 Επιλέξτε επίθεμα κατάλληλου μεγέθους μετά τον καθαρισμό

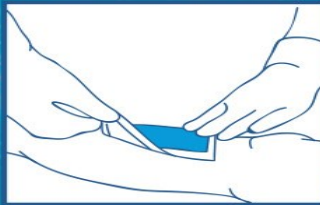

2 Εφαρμόστε το επίθεμα απευθείας με τη λευκή πλευρά επάνω στο τραύμα

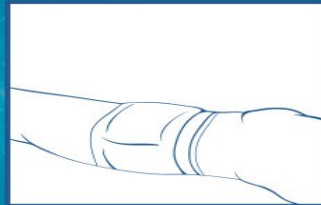

3 Καλύψτε το επίθεμα με κατάλληλο επίδεσμο αν κριθεί απαραίτητο

| ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΕΟΠΠΥ | ΕΞ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΟΦΕΛΙΜΟ | ΕΑΝ | ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑΚΟΥΤΙ |
|---|---|-------------|-------------|---------------|------------------|
| NEODERM SUPER ABSORBENT DRESSING | Επιθέματα με πλέγμα ρύθμισης αναρρόφησης για Έλκη με κάθε βαθμό εξιδρώματος, μη κολλητικά | 10CMx10CM | 7,5CMx7,5CM | 5213012631130 | 10 |
| NEODERM SUPER ABSORBENT DRESSING | Επιθέματα με πλέγμα ρύθμισης αναρρόφησης για Έλκη με κάθε βαθμό εξιδρώματος, μη κολλητικά | 15CMx15CM | 12CMx12CM | 5213012631123 | 10 |
| NEODERM SUPER ABSORBENT DRESSING | Επιθέματα με πλέγμα ρύθμισης αναρρόφησης για Έλκη με κάθε βαθμό εξιδρώματος, μη κολλητικά | 20CMx20CM | 17CMx17CM | 5213012631147 | 10 |
| NEODERM SUPER ABSORBENT DRESSING | Επιθέματα με πλέγμα ρύθμισης αναρρόφησης για Έλκη με κάθε βαθμό εξιδρώματος, μη κολλητικά | 20CMx10CM | 17CMx7CM | 5213012631161 | 10 |
| NEODERM SUPER ABSORBENT DRESSING | Επιθέματα με πλέγμα ρύθμισης αναρρόφησης για Έλκη με κάθε βαθμό εξιδρώματος, μη κολλητικά | 20CMx15CM | 17CMx12CM | 5213012631154 | 10 |
| NEODERM SUPER ABSORBENT DRESSING | Επιθέματα με πλέγμα ρύθμισης αναρρόφησης για Έλκη με κάθε βαθμό εξιδρώματος, μη κολλητικά | 25CMx20CM | 22CMx17CM | 5213012631178 | 10 |
| NEODERM SUPER ABSORBENT DRESSING ADHERENT | Επιθέματα με πλέγμα ρύθμισης αναρρόφησης για Έλκη με κάθε βαθμό εξιδρώματος, κολλητικά | 10CMx10CM | 7,5CMx7,5CM | 5213012631079 | 10 |
| NEODERM SUPER ABSORBENT DRESSING ADHERENT | Επιθέματα με πλέγμα ρύθμισης αναρρόφησης για Έλκη με κάθε βαθμό εξιδρώματος, κολλητικά | 15CMx15CM | 12CMx12CM | 5213012631062 | 10 |
| NEODERM SUPER ABSORBENT DRESSING ADHERENT | Επιθέματα με πλέγμα ρύθμισης αναρρόφησης για Έλκη με κάθε βαθμό εξιδρώματος, κολλητικά | 20CMx20CM | 17CMx17CM | 5213012631086 | 10 |
| NEODERM SUPER ABSORBENT DRESSING ADHERENT | Επιθέματα με πλέγμα ρύθμισης αναρρόφησης για Έλκη με κάθε βαθμό εξιδρώματος, κολλητικά | 20CMx10CM | 17CMx7CM | 5213012631109 | 10 |
| NEODERM SUPER ABSORBENT DRESSING ADHERENT | Επιθέματα με πλέγμα ρύθμισης αναρρόφησης για Έλκη με κάθε βαθμό εξιδρώματος, κολλητικά | 20CMx15CM | 17CMx12CM | 5213012631093 | 10 |

NEODERM

ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΣΗΣ

Επίθεμα εξαιρετικής απορροφητικότητας για χρήση σε έλκη με κάθε βαθμό εξίδρωσης

Το NEODERM επίθεμα με πλέγμα ρύθμισης για κάθε βαθμό εξίδρωσης, είναι αποστειρωμένο επίθεμα που χρησιμοποιείται σε έλκη με μέτρια έως βαριά εξιδρώματα και αποτελείται από ένα διαπερατό από τον αέρα και αδιάβροχο μη υφασμένο στρώμα, ένα εξαιρετικά απορροφητικό στρώμα επιθέματος και ένα υδροδιαπερατό μη υφασμένο στρώμα. Η κατασκευή τριών στρωμάτων διευκολύνει τη διαχείριση υγρών για να παρέχει το βέλτιστο υγρό περιβάλλον, που οδηγεί στην προώθηση ταχύτερης επούλωσης του τραύματος. Το απορροφητικό επίθεμα παρέχει εξαιρετική απορρόφηση και απομονώνει τα εξιδρώματα. Αυτό ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο βλαβών στο δέρμα γύρω από το τραύμα.

180g / 100cm²

Εξαιρετική ικανότητα απορρόφησης, ο υπέρ-απορροφητικός πυρήνας του επιθέματος έχει τη δυνατότητα απορρόφησης έως και 180g/100cm², συμβάλλοντας ενεργά στη μείωση της συχνότητας αλλαγών επιθεμάτων.

Κλείδωμα τεχνολογίας

Τα υψηλής ποιότητας υλικά του επιθέματος και η προηγμένη τεχνολογία σφράγισης έκαναν τον υπέρ - απορροφητικό πυρήνα του, όχι μόνο να έχει εξαιρετική ικανότητα απορρόφησης, αλλά και ισχυρή ικανότητα κλειδώματος, έτσι ώστε να ασφαλίζει σταθερά το εξίδρωμα του τραύματος αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαρροή και μειώνοντας τον κίνδυνο διαβροχής.



Προστατευτικό Κάλυμμα

Αποτρέπει την διαρροή.

Αντέχει στο νερό.

Υπέρ Απορροφητικός Πυρήνας

Εξαιρετική απορροφητική ικανότητα.

Βοηθάει να αποφεύγονται οι διαρροές.

Σχηματίζει τζελ για τη δημιουργία συστήματος κλειδώματος εξιδρωμάτων

Υδρόφιλο Στρώμα Διαπερατότητας

Ταχεία διείσδυση εξιδρώματος



Formato do Penso



Χρησιμότητα Επιθέματος/ Ενδείξεις

- Εξαιρετική απορρόφηση του εξιδρώματος πληγών, μειώνει τον κίνδυνο διαβροχής και διαρροής
- Εγκλωβίζει τα υγρά των εξιδρωμάτων στο εσωτερικό του πυρήνα
- Ενδείκνυται για μετεγχειρητική φροντίδα τραυμάτων, έλκη ποδιών, έλκη οφειλόμενα σε παρατεταμένη πίεση που ασκείται σε περιοχές του σώματος (έλκη κατακλίσεων), διαβητικό πόδι.

Αντενδείξεις

- Να μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε ξηρά ή χαμηλού εξιδρώματος τραύματα, μάτια, βλεννογόνους ή σε κοιλότητες τραυμάτων, επειδή το επίθεμα διογκώνεται κατά την απορρόφηση. Μην το χρησιμοποιείτε σε εγκαύματα τρίτου βαθμού.
- Απαγορεύεται η χρήση από άτομα με αλλεργίες ή υπερευαισθησία στο επίθεμα ή στα συστατικά του.



**PROFESSIONAL
DIETETICS**